

Игла двусторонняя Improvacuter

Игла двусторонняя Improvacuter типа «Flashback»

Игла двусторонняя Improvacuter «Improsafe» в комплекте с держателем с защитой от укола

Производитель: «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай, Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., No. 102, Kaiyuan Avenue Science city, Guangzhou Economic & Technological Development District, Gugtiizltou, 510530, China

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7204 от 23.05.2018

Инструкция по эксплуатации.

Применение: Иглы двусторонние применяются для взятия венозной крови. Иглы двусторонние должны использоваться в соответствии с данной инструкцией. Иглы двусторонние стерильны, апиrogenны.

Описание:

Игла двусторонняя – это игла, одна сторона которой предназначена для венепункции, а вторая, в защитном резиновом клапане - для введения в вакуумную пробирку. Резьба на муфте иглы предназначена для ввинчивания иглы в держатель. Игла, направляемая в вену пациента, заточена лазером и силиконизирована.

Иглы двусторонние типа «Flashback» с камерой визуализации представляют собой стерильные изделия однократного применения, состоящие из двусторонней иглы, закрепленной в пластиковом корпусе, снабженным прозрачной визуальной камерой специальной формы. Визуальная камера сделана из прозрачного пластика и служит для контроля поступления крови при попадании иглы в вену.

Игла двусторонняя «Improsafe» в комплекте с держателем с защитой от укола состоит из двусторонней иглы с заранее присоединенным держателем, который оснащен защитным щитком. Защитный щиток, служащий для защиты от случайного укола иглой, можно активировать для закрытия иглы сразу после окончания процедуры венепункции.

Маркировка	Размер	Цвет
22Gx1,5"	0,7x38 мм	Черная
21Gx1,5"	0,8x38 мм	Зеленая

Срок годности и дата производства:

Игла двусторонняя Improvacuter «Improsafe» в комплекте с держателем с защитой от укола - срок годности 3 года, дата производства указана на упаковке. Не используйте иглы двусторонние после истечения срока годности.

Игла двусторонняя Improvacuter и Игла двусторонняя Improvacuter типа «Flashback» - срок годности 5 лет, дата производства указана на упаковке. Не используйте иглы двусторонние после истечения срока годности.

Меры профилактики/предосторожности:

- Обращайтесь со всеми биологическими образцами и острыми предметами (ланцетами, иглами, иглами двусторонними, луэр-адаптерами и иглами-бабочками) в соответствии с правилами, принятыми в вашем медицинском учреждении.
- Обращайте особое внимание на все случаи контакта с биологическими образцами (например, при случайном уколе иглой-бабочкой во время венепункции), поскольку при этом возможна передача возбудителей опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты и др.).
- Сбрасывайте все использованные острые предметы (ланцеты, иглы, иглы двусторонние, луэр-адаптеры и иглы-бабочки) в контейнеры для утилизации.
- В целях снижения риска заражения проводите процедуру взятия крови в специальных перчатках.

Рекомендации по использованию игл двусторонних

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГЛ ДВУСТОРОННИХ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЕНЕПУНКЦИИ И ПРИ РАБОТЕ С ПРОБИРКАМИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ: Перфорированная этикетка служит не только для упрощения маркировки, но также как индикатор стерильности и целостности иглы. Если перфорация разорвана или повреждена, утилизируйте такую иглу и возьмите другую.

- Снимите защитный колпачок с клапанной части иглы (рис. 1).
- Вкрутите иглу перпендикулярно в держатель (рис. 2). Убедитесь, что игла плотно зафиксирована в держателе и не раскрутится во время венепункции.



ВНИМАНИЕ: Неправильное вкручивание иглы в держатель может привести к повреждению держателя и иглы и последующему выпадению иглы из держателя во время венопункции


- Выберите место венопункции. Наложите жгут (не более, чем на 1 минуту). Проздезинфицируйте место венопункции. **НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ ПОСЛЕ ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЯ!**
- Снимите с иглы оставшуюся часть колпачка (рис.3). Введите иглу в вену (рис.4). При использовании иглы двусторонней с камерой визуализации проконтролируйте поступление крови при попадании иглы в вену через полупрозрачную часть муфты иглы.
- Вставьте пробирку вакуумную в держатель и надавите, чтобы вторая игла (закрытая клапаном) проколола резиновую часть крышки пробирки. Помещайте пробирку в центр держателя при прокалывании крышки, чтобы предотвратить прокол ее боковой стенки и преждевременную потерю вакуума (рис. 5).

СНИМИТЕ ЖГУТ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКУ. ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СОДЕРЖИМОГО ПРОБИРКИ С КРЫШКОЙ ИЛИ КЛАПАННЫМ КОНЦОМ ИГЛЫ. Для обеспечения правильного наполнения пробирки всегда удерживайте пробирку в держателе, надавливая на ее дно большим пальцем.

- Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, осторожно извлеките иглу (вместе с держателем) из вены, одновременно прижимая к месту венопункции стерильную салфетку с антисептиком до прекращения кровотечения (рис.6).
- Утилизируйте иглу и держатель в соответствии с политикой вашего учреждения (рис. 7).


НЕ НАДЕВАЙТЕ ПОВТОРНО НА ИГЛУ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК! Повторное надевание на иглу снятого защитного футляра увеличивает риск укола иглой.

- Наложите на место венопункции повязку либо бактерицидный пластырь.

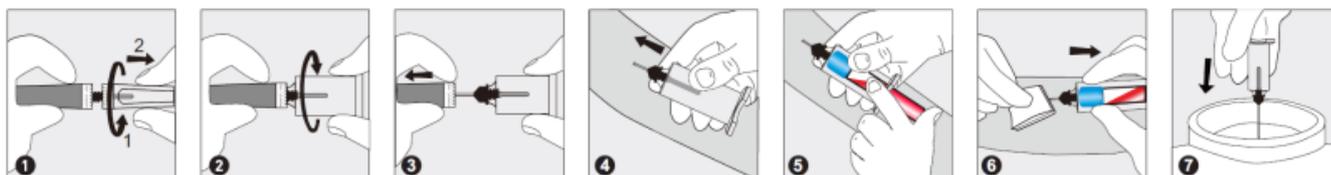

При использовании иглы двусторонней Improvacuter «Improsafe» в комплекте с держателем с защитой от укола

Сразу после извлечения иглы из вены активируйте защитный механизм (для предотвращения случайного укола иглой), переместив защитный кожух вверх (рис. а) и слегка прижав защитный кожух к игле на устойчивой поверхности или с сильным усилием (рис. б). Ясно различимый щелчок свидетельствует о том, что защитный механизм сработал.

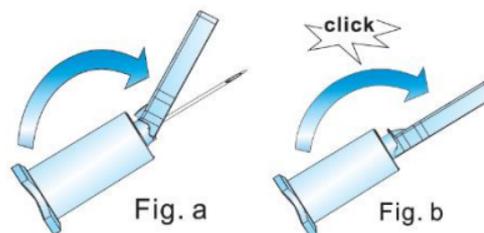

Утилизация

Обеззараживание и утилизация игл двусторонних осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями) и внутренними протоколами, принятыми в ЛПУ.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в сухом, проветриваемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей и хранить вдали от источника тепла или возгорания.

Упаковка

Иглы двусторонние – в индивидуальном пластиковом футляре, по 100 штук в картонной коробке. Иглы двусторонние с держателем – в индивидуальном пластиковом футляре, по 25 штук в картонной коробке.

Маркировка

Знаки, используемые на этикетках и упаковке:

	Изделие для одноразового использования
	Маркировка Европейской комиссии (CE)
	Производитель
	Дата производства
	Срок годности
	Артикул
	Номер партии

