

UX CLEAN™ -C

REF BE-301-124

Идентификация реагента для лабораторной диагностики UX CLEAN™ -C

Использование по назначению

Только для диагностики in vitro

UX CLEAN -C представляет собой концентрированный щелочной промывочный раствор для очистки секции анализа СМ полностью автоматического интегрированного анализатора мочи Sysmex (UX-2000). Не используйте UX CLEAN -C для очистки секции анализа FCM. Ни в коем случае не используйте аспирационные насадки FCM для аспирации UX CLEAN -C, в противном случае это может привести к неисправности прибора.

Принципы метода исследования

UX CLEAN -C используется только с целью промывки.

Компоненты

UX CLEAN -C не содержит каких-либо реактивных компонентов или других компонентов, которые могут повлиять на процедуру анализа.

Предупреждения и меры предосторожности

1. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите Руководство по эксплуатации анализатора и Паспорт безопасности.
2. После разбавления в растворе могут появиться грибки и / или бактерии. Используйте разбавленный промывочный раствор в течение 15 дней после разбавления.
3. Используйте промывочный раствор до истечения срока годности. В случае нарушения условий хранения соответствующие характеристики реагента не сохраняются даже в пределах срока годности.

Опасно

H314

Вызывает тяжелые химические ожоги кожи и серьезные травмы для глаз.



P264

После работы тщательно вымыть кожа.

P280

Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P303+P361+P353

ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): немедленно снять все загрязненные предметы одежды. Промыть кожу водой/смыть под душем.

P305+P351+P338

ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности удалить имеющиеся контактные линзы. Продолжать промывку.

P310

Немедленно позвонить в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДАМ или врачу.

P501

Содержимое/емкость удалить согласно с местными и национальными требованиями по утилизации опасных отходов.

Необходимое дополнительное оборудование

Обращайтесь к Руководству по эксплуатации анализатора.

Порядок проведения исследования

Для получения специфических инструкций по корректному использованию UX CLEAN -C обращайтесь к Руководству по эксплуатации анализатора.

Хранение и срок годности не вскрытого продукта

1. UX CLEAN -C должен храниться при температуре от 1 °C до 30 °C. Не подвергайте продукт прямому воздействию солнечных лучей.
2. UX CLEAN -C можно использовать до конца месяца, напечатанного на каждой бутылке и коробке при ее хранении в не вскрытом состоянии.
3. Цвет может измениться до темно-коричневого, однако это не влияет на качество.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

1. UX CLEAN -C должен храниться при температуре от 1 °C до 30 °C. Не подвергайте продукт прямому воздействию солнечных лучей.
2. Используйте разбавленный промывочный раствор в течение 15 дней после разбавления.
3. Используйте концентрированный промывочный раствор UX CLEAN -C до истечения срока годности.
4. Цвет может измениться до темно-коричневого, однако это не влияет на качество.
5. См. Паспорт безопасности.

Подготовка реагентов

Перед использованием разбавьте концентрированный промывочный раствор UX CLEAN -C очищенной водой в соотношении 1:10 (1 часть концентрированного раствора разбавляется 9 частями очищенной воды в канистре для промывающего раствора, которая поставляется вместе с анализатором.).

Процедуры утилизации

Процедуры утилизации должны отвечать требованиям соответствующих местных норм.

Изготовитель



Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Уполномоченный представитель / дистрибьюторы



Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

Информация о продукте

UX CLEAN -C (UXC-500A)

1 L x 5 флаконов

Дата выпуска или пересмотра

12/2015

