

CA CLEAN TM II

CA CLEAN TM: промывочный раствор для дозаторов автоматических коагулометрических анализаторов

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для промывки дозаторов автоматических коагулометрических анализаторов

СОСТАВ

соляная кислота 0,16%
Неионогенное ПАВ 0,50%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использовать только для диагностики In Vitro.
2. Является кислотой. Соблюдайте осторожность при обращении с продуктом.
3. При попадании на слизистые оболочки глаз и рта, незамедлительно промыть их большим количеством воды; в случае необходимости обратитесь к врачу.
4. При попадании моющего средства на руки, кожные покровы необходимо промыть большим количеством воды.
5. Нейтрализовать и смывать большим количеством воды.
6. Не замораживать.
7. После вскрытия хранить при температуре от 5 до 35 ° C, использовать в течение 2 месяцев.
8. После вскрытия предохранять от загрязнения.
9. Не использовать после окончания срока годности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

За информацией о правильном использовании обращаться к Руководству пользователя автоматических коагулометров.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ

Хранить при температуре от 5 до 35 ° C (не замораживать).
Срок годности указан на коробке и этикетке флакона.
Стабилен в течение 2 месяцев после вскрытия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SYSMEX CORPORATION

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Europe: SYSMEX EUROPE GMBH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

North America: SYSMEX AMERICA, INC.

1 Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60060, U.S.A.

Japan: SYSMEX CORPORATION

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- CA CLEAN II (ОСР-500A) 500 мл x 1 бутылка
- CA CLEAN II (ОСР-520A) 45 мл x 1 бутылка

Дата выпуска: Апрель 2010