

Жгут медицинский одноразовый с принадлежностями

Производитель: «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., No. 102, Kaiyuan Avenue Science City, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou 510530, P.R. of China

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7625 от 17.09.2018

Инструкция по эксплуатации.

Применение: Жгуты одноразовые предназначены для пережатия вены и выбора места венопункции. Применение одноразовых жгутов снижает риск переноса инфекции.

Описание: Жгут не содержит латекса. Так как среди пациентов встречаются люди, страдающей аллергией, данные жгуты являются гипоаллергенными.

Жгут одноразовый выпускается в виде свернутой в рулон полосы прочной и эластичной безлатексной силиконовой резины, разделенной перфорацией на 50 частей. Для удобства жгуты упакованы в картонный контейнер, облегчающий процесс отделения жгута от общего рулона. Безлатексный материал жгута обладает гипоаллергенными свойствами, не травмирует кожу.

Параметры жгута многоразового:

20 ± 2мм x 400 ± 10 мм

Красители жгутов:

Цвет	Индекс	Формула
Голубой: Light blue: Pigment Red 29 & Pigment Blue 13:4	57455-37-5 147-14-8	Na6A14Si6S4O20 Ultramarine Blue 29 C32H16CuN8 (29H,3 IH-phthalocyaninato(2-)- N29,N3O,N3 1 ,N32)copper
Pink: Titanium(IV) oxide & Pigment Red 254	1317-70-0 84632-65-5	TiO2 titanium dioxide C18H10C12N2O2 Bis-(p-chrolopheny)-1.4-diketopyrrolo (3.4- c)pyrrole

Срок годности и дата производства: указаны на упаковке.

Не используйте жгут после истечения срока годности.

Срок годности вскрытой упаковки: срок годности каждого жгута соответствует сроку годности, указанному на упаковке.

Одноразовый жгут предназначен для использования только один раз. Повторное использование продукта повышает риск переноса опасных инфекций.

Рекомендации по использованию жгута

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖГУТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ!

Жгуты используются во время процедуры взятия венозной крови для обеспечения достаточного давления на руку. Ограничение области кровотока позволяет улучшить визуализацию вен.

Давление жгута не должно перекрывать ток артериальной крови.

Оберните полосу жгута одноразового вокруг руки примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места венопункции. Завяжите жгут и закрепите, как показано на рисунке.

Жгут не должен причинять пациенту неудобство. Он должен быть достаточно затянут, чтобы ограничить ток венозной крови, но не препятствовать ему. Возможно снижение систолического давления на 20 - 30 мм рт. ст., т.е. у здорового пациента с систолическим давлением около 120 - 130 мм рт. ст. оно снизится до 100 мм рт. ст.

Продолжительность наложения жгута не должна превышать 1 минуту (риск неверных результатов вследствие гемоконцентрации).

Если требуется больше времени, необходимо снять жгут, чтобы восстановить ток крови в полном объеме и вернуть коже нормальный цвет.


Если цвет кожи примет синюшный оттенок, немедленно снимите жгут и не затягивайте его до тех пор, пока кожа не примет первоначальный цвет.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте жгут на руке больше, чем на одну минуту. В случаях, когда ток крови недостаточен для отбора, слегка затяните жгут на время взятия крови.

Как только кровь начнет поступать в вакуумную пробирку для взятия венозной крови, снимите жгут.

При значительном уменьшении поступления крови в пробирку, повторно наденьте жгут на руку на короткое время.

Сразу после снятия сбросьте жгут одноразовый в специальный контейнер для утилизации.

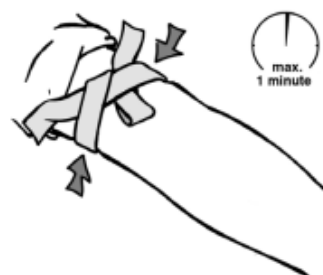

Утилизация

Обеззараживание и утилизация жгутов одноразовых осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и внутренними протоколами, принятыми в ЛПУ.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в сухом, проветриваемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей и хранить вдали от источника тепла или возгорания.

Условия хранения:

- Диапазон температуры окружающего воздуха: -20°C - +60°C;
- Относительная влажность: 35-80%;

ВНИМАНИЕ: Избегайте воздействия прямого солнечного света. Превышение максимальной рекомендованной температуры хранения может привести к деформации и повреждению жгута.








Транспортируйте жгуты при температуре от -20°C до +60°C. Жгуты, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Упаковка

Жгут одноразовый – 50 жгутов в рулоне, в картонной коробке.

Маркировка

Знаки, используемые на этикетках и упаковке:

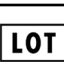	Изделие для одноразового использования
	Маркировка Европейской комиссии (CE)
	Производитель
	Дата производства
	Срок годности
	Артикул
	Номер партии

