

## НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### Буферный раствор SP-Buffer

#### ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Буферный раствор SP-Buffer используется для разбавления красителей для достижения наиболее подходящих и постоянных характеристик окрашивания в автоматических гематологических станциях для приготовления и окраски мазков крови (SP-1000i, SP-100i).

#### МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Буферный раствор SP-Buffer используется для разбавления окрашивающих реагентов, применяемых в автоматических гематологических станциях для приготовления и окраски мазков крови в пропорциях 1 : 10 для разбавления красителя 1 и 1 : 25 для разбавления красителя 2.

#### СОСТАВ

1% фосфатный буфер

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещества, содержащиеся в настоящем реагенте, не классифицированы как опасные вещества или значения их концентрации находятся ниже пороговых значений, указанных в директиве 1999/45/ЕС. Поэтому настоящий реагент не классифицирован как опасный.




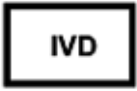


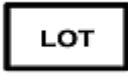
#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Условия хранения: от 5°C до 30°C, не замораживать  
Истечение срока действия: один год с момента изготовления в закрытом состоянии  
Срок стабильности вскрытого реагента: 60 дней

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте отходы в соответствии с требованиями соответствующих местных, региональных и федеральных норм.

#### ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТИКЕТОК

 <p><b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b> Sysmex Europe GmbH Bornbarch 1 22848 Norderstedt Deutschland</p>	
 <p>Смотрите инструкции по использованию</p>	 <p>Ограничение температур</p>
 <p>Медицинский аппарат для диагностики <i>In vitro</i></p>	 <p>Использовать до</p>
 <p>Маркировка знаком CE</p>	 <p>Код партии</p>

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Буферный раствор SP-Buffer 10 литров  
Номер по каталогу: 37000304

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ: сентябрь 2013