

UF II PACK™ -BAC

REF 064-0171-2

Идентификация реагента для лабораторной диагностики UF II PACK™ -BAC

Использование по назначению

Только для диагностики in vitro

UF II PACK -BAC представляет собой дилуэнт, использующийся при анализе мочи для определения количества бактерий с помощью полностью автоматизированных анализаторов частиц мочи Sysmex UF-1000i и UF-500i.

Принципы метода исследования

Около 800 µL образца мочи забирается анализатором. Для окрашивания клеточной структуры бактерий в реакционной камере смешиваются около 425 µL реагента UF II PACK -BAC, около 13 µL реагента UF II SEARCH -BAC и около 63 µL образца мочи.

Далее полученный образец вводится в проточную камеру, где измеряются рассеянный свет и флуоресцентное излучение.

Описание принципа анализа приведено в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.

Компоненты

Буфер	1,9 %
Катионное ПАВ	0,1 %

Предупреждения и меры предосторожности

1. Запрещается использовать реагент с истекшим сроком годности.
2. Избегайте прямого контакта с реагентом. Он может вызывать раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек.
3. При работе с реагентом обязательно надевайте защитную одежду и перчатки.
4. Если по неосторожности реагент попал на кожу, немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды.
5. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды. Немедленно обратитесь к врачу.
6. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
7. Реагент следует держать на удалении от источников тепла и открытого огня. Реагент склонен к воспламенению при высоких температурах. В условиях воздействия тепла или пламени реагент представляет собой источник пожарной опасности от низкого до среднего уровня.

Осторожно

- H319 Вызывает тяжелые раздражения глаз.
- P264 После употребления тщательно помыть кожу.
- P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности удалить имеющиеся контактные линзы. Продолжать промывку.
- P337+P313 При продолжающемся раздражении глаз: проконсультироваться с врачом/обратиться за помощью к врачу.



Порядок проведения исследования

1. Реагент UF II PACK -BAC следует использовать при температуре 15–30 °C. При других температурных условиях результаты могут оказаться неточными.
2. Ослабьте и снимите крышку с контейнера с реагентом UF II PACK -BAC. Присоедините узел отбора реагента к контейнеру с реагентом UF II PACK -BAC. Затяните крышку. Присоедините трубку для реагента UF II PACK -BAC, которая идет от прибора к узлу отбора реагента.
3. Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.

Хранение и срок годности не вскрытого продукта

1. Храните реагент UF II PACK -BAC при температуре 2–35 °C, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей.
2. Если контейнер с реагентом не вскрывался, реагент можно хранить вплоть до истечения срока годности, указанного на контейнере.
3. Не используйте реагент, который, возможно, подвергся замораживанию.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

1. После вскрытия контейнера реагент сохраняет свои свойства в течение 60 дней при условии хранения при температуре 2–35 °C. Не замораживайте реагент.
2. При проявлении признаков загрязнения или потери свойств, например при появлении мутности или при изменении цвета, реагент UF II PACK -BAC следует заменить.

Рабочие характеристики

См. руководство по эксплуатации анализатора.

Ограничения процедуры исследования

Результаты анализа могут оказаться неточными на аномальных образцах, при использовании пробирок с консервантами, в случае присутствия в образцах лекарственных препаратов с флуоресцентными свойствами и на образцах со следами гематурии или пиурии. Хранение образцов в холодильнике может приводить к осаждению кристаллов. Рост бактерий в хранящихся образцах может приводить к завышенным результатам подсчета бактерий.

Признаки таких условий описаны в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.

Отбор первичных проб, обработка и хранение

Реагенты UF II PACK -BAC и UF II SEARCH -BAC предназначены для использования при анализе образцов мочи человека.

Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.

Процедуры утилизации

Процедуры утилизации должны отвечать требованиям соответствующих местных норм.

Изготовитель



Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Уполномоченные представители

Европа, Ближний Восток и Африка:



Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

Северная и Южная Америка:

Sysmex America, Inc.
577 Aptakistic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.

Юго-Восточная Азия:

Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

Информация о продукте

UF II PACK -BAC (UPB-300A): 2,1 L x 2

Дата выпуска или пересмотра

09/2016

